

INSTRUÇÕES DE USO

APLICADORES FLEXÍVEIS PARA OZONIOTERAPIA

(CONJUNTO Y ESTETO)



Manual com especificações e
instruções de procedimentos
para processos de ozonioterapia.

Fabricante e Distribuidor:

PHILOZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GERADORES DE OZÔNIO EIRELI
CNPJ: 07.138.875/0001-01
IE: 254.915.329

CNPJ: 07.138.875/0001-01 - IE: 254.915.329
Autorização de Funcionamento ANVISA:
UH76W162525L (8.04729.1)
Responsável Técnico:
Letícia M. B. Philippi – CRF/SC 5084

Endereço:
Rua Amador Bueno da Ribeira, 258
Bairro Nova Esperança
Balneário Camboriú – SC
CEP: 88.336-320 📍
FONE: 47 3366-7000
E-MAIL: assistencia@philozon.com.br
SITE: www.philozon.com.br



Estas instruções são parte integrante do produto e devem acompanhar o equipamento quando usado por outras pessoas ou transferido para outro local. Este manual de instruções deve ser mantido em boas condições e disponível para uso imediato.

2

FINALIDADE DE USO

Indicado para aplicação de ozônio em procedimentos estéticos de ozonioterapia. O conjunto Y (estetó) permite a criação de uma atmosfera isolada no local de aplicação (ouvido), para aplicação do gás ozônio, isolado do ar ambiente.

3

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição	Código	Apresentação	Especificação
Conjunto Y (estetó)	364	Embalagem plástica com 1 unidade	L = 80 mm C = 180 mm A = 10 mm

5

MODO DE USO

5.1

Orientações Gerais

5.1.1

Antes da aplicação, desinfetar as olivas de silicone nas pontas dos tubos de aço com álcool 70%. Deixar o álcool evaporar totalmente antes do uso.

5.2

Utilização do aplicador

5.2.1

Inserir as olivas de silicone nos ouvidos da pessoa.

5.2.2

Conectar a seringa no bocal de saída do gerador de ozônio.

5.2.3

Selecionar a concentração de ozônio e liberar a saída.

5.2.4

Desligar a liberação de ozônio no equipamento.

5.2.5 Conectar a seringa com o ozônio na conexão luer lock da extensão do conjunto Y.

5.2.6 Injetar o ozônio.



NOTA: A dose (concentração e tempo de exposição) devem ser definidos por profissional habilitado em Ozonioterapia.

6

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS



NOTA: Siga as instruções de aplicação a fim de evitar o vazamento de ozônio para o ambiente.

6.1.1 Produto não estéril: efetue a limpeza e desinfecção com álcool 70% antes do uso, em todas as superfícies. Aguarde o álcool evaporar.

6.1.2 Se necessário lavar o produto, desconecte as mangueiras e utilize detergente neutro, enxágue com água abundante e deixe secar completamente. Depois utilize o álcool 70%, deixando-o evaporar.

6.1.3 Evite movimentos bruscos no local onde o aplicador está sendo utilizado, para evitar vazamento involuntário do gás para o ambiente.

6.1.4 O ozônio é irritante para as vias aéreas. Em caso de vazamento acidental, evite respirá-lo e ventile imediatamente o ambiente

6.1.5 A dosagem (concentração e tempo de exposição ao ozônio) devem ser definidos por profissional habilitado em Ozonioterapia.

6.1.6 Não utilize o produto para outros fins além do indicado nesta Instrução de Uso.

6.1.7 Não coloque um volume excessivo de gás, isto poderá ocasionar vazamento para o ambiente.

6.1.8 As mangueiras de silicone podem sofrer desgaste com o uso e devem ser substituídas sempre que necessário.

6.1.9 Este produto não gera ozônio, nem produz vácuo. Estes recursos devem ser realizados por equipamento específico (gerador de ozônio, bomba de vácuo), regularizado na Anvisa.

7

GARANTIA

7.1.1 O produto tem garantia contra falhas do material.

7.1.2 O uso inadequado, fora da especificação deste documento, não é coberto por garantia.

7.1.3 A garantia não se estende ao equipamento utilizado para gerar ozônio e vácuo.



Contato: 47 3366-7000 📞
assistencia@philozon.com.br
www.philozon.com.br

 @philozon
 /grupophilozon
 grupophilozon
www.philozon.com.br

Philozon
Geradores de Ozônio