

INSTRUÇÕES DE USO

APLICADORES FLEXÍVEIS PARA OZONIOTERAPIA (VENTOSAS)



Manual com especificações e
instruções de procedimentos
para processos de ozonioterapia.

Fabricante e Distribuidor:

PHILOZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
GERADORES DE OZÔNIO EIRELI
CNPJ: 07.138.875/0001-01
IE: 254.915.329

CNPJ: 07.138.875/0001-01 - IE: 254.915.329
Autorização de Funcionamento ANVISA:
UH76W162525L (8.04729.1)
Responsável Técnico:
Letícia M. B. Philippi – CRF/SC 5084

Endereço:
Rua Amador Bueno da Ribeira, 258
Bairro Nova Esperança
Balneário Camboriú – SC
CEP: 88.336-320 📍
FONE: 47 3366-7000
E-MAIL: assistencia@philozon.com.br
SITE: www.philozon.com.br



Estas instruções são parte integrante do produto e devem acompanhar o equipamento quando usado por outras pessoas ou transferido para outro local. Este manual de instruções deve ser mantido em boas condições e disponível para uso imediato.

2 FINALIDADE DE USO

Indicado para aplicação de ozônio em procedimentos estéticos de ozonioterapia. A ventosa permite a criação de uma atmosfera isolada no local de aplicação (pele), retirando o ar ambiente e permitindo a chegada do ozônio.

3 APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Código	Apresentação	Especificação
Ventosa média	549	Embalagem com 1 unidade	D = 50 mm A = 90 mm
Ventosa grande	550	Embalagem com 1 unidade	D = 65 mm A = 90 mm

5 MODO DE USO

5.1 Orientações Gerais

5.1.1 Desinfetar as ventosas com álcool 70% antes do seu uso. Deixar o álcool evaporar totalmente antes do uso.

5.2 Utilização do aplicador

5.2.1 Colocar a ventosa sob a pele onde será aplicado o ozônio.

5.2.2 Encaixar o conector da extensão da ventosa a uma seringa vazia.

5.2.3 Puxar o êmbolo da seringa, produzindo vácuo dentro da ventosa.

5.2.4 Utilizar a trava plástica da extensão para obstruir a mangueira, a fim de manter o vácuo.

- 5.2.5 Retirar a seringa.
- 5.2.6 Conectar a seringa no bocal de saída do gerador de ozônio.
- 5.2.7 Selecionar a concentração de Ozônio e liberar a saída.
- 5.2.8 Finalizada a liberação na seringa, desligar a liberação de ozônio no equipamento.
- 5.2.9 Remover a seringa do bocal de saída de ozônio.
- 5.2.10 Encaixar no conector da extensão da ventosa.
- 5.2.11 Abrir a trava.
- 5.2.12 Injetar o ozônio dentro da ventosa, no volume de cerca da metade.
- 5.2.13 Fechar a trava para evitar vazamento do ozônio pela seringa.
- 5.2.14 Aguardar o tempo definido para a aplicação.



NOTA: A dose (concentração e tempo de exposição) devem ser definidos por profissional habilitado em Ozonioterapia.

- 5.2.15 Abrir a trava.
- 5.2.16 Puxar o ozônio da ventosa pela seringa na mesma quantidade de ozônio que foi injetado.
- 5.2.17 Retirar a seringa do conector da extensão da ventosa e conectar no bocal da bomba de vácuo ou no bocal de vácuo do gerador de ozônio (se houver)



NOTA: Recomenda-se que seja utilizado um filtro microbiológico no bocal de vácuo, para evitar que partículas sejam sugadas.

5.2.18

Acionar o vácuo.

5.2.19

A ventosa pode ser retirada da pele.

6

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

6.1.1

Produto não estéril: efetue a limpeza e desinfecção com álcool 70% antes do uso, em todas as superfícies. Aguarde o álcool evaporar.

6.1.2

Se necessário lavar o produto, desconecte as mangueiras e utilize detergente neutro, enxágue com água abundante e deixe secar completamente. Depois utilize o álcool 70%, deixando-o evaporar.

6.1.3

Evite movimentos bruscos no local onde o aplicador está sendo utilizado, para evitar vazamento involuntário do gás para o ambiente.

6.1.4

O ozônio é irritante para as vias aéreas. Em caso de vazamento acidental, evite respirá-lo e ventile imediatamente o ambiente.

6.1.5

A dosagem (concentração e tempo de exposição ao ozônio) devem ser definidos por profissional habilitado em Ozonioterapia.

- 6.1.6 Não utilize o produto para outros fins além do indicado nesta Instrução de Uso.
- 6.1.7 Não coloque um volume excessivo de gás, isto poderá ocasionar vazamento para o ambiente.
- 6.1.8 As mangueiras de silicone podem sofrer desgaste com o uso e devem ser substituídas sempre que necessário.
- 6.1.9 O vidro é frágil, evite choques e impactos. Não é possível reparar o vidro.
- 6.1.10 Este produto não gera ozônio, nem produz vácuo. Estes recursos devem ser realizados por equipamento específico (gerador de ozônio, bomba de vácuo), regularizado na Anvisa.

7

GARANTIA

- 7.1.1 O produto tem garantia contra falhas do material.
- 7.1.2 O uso inadequado, fora da especificação deste documento, não é coberto por garantia.
- 7.1.3 A garantia não se estende ao equipamento utilizado para gerar ozônio e vácuo.



O vidro é frágil. Quebras e trincas não são cobertas pela garantia do produto*.

Philozon
Geradores de Ozônio

Contato: 47 3366-7000 ☎
assistencia@philozon.com.br
www.philozon.com.br

 @philozon
 /grupophilozon
 grupophilozon
www.philozon.com.br

Philozon
Geradores de Ozônio