



Philozon

TORRE DE OZONIZAÇÃO DE ÁGUA 3L VET

Instruções de uso

1. INFORMAÇÕES DO FABRICANTE	4
2. TORRE DE OZONIZAÇÃO 3L VET	5
3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM	5
4. APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO	6
4.1 Partes Incluídas (Lista de Acessórios)	6
4.2 Partes necessárias para o funcionamento	7
4.3 Especificações Técnicas	8
4.4 Embalagem	8
5. INSTALAÇÃO E USABILIDADE	9
5.1 Orientações Gerais	9
5.2 Instalação e fixação da Torre	9
5.3 Abastecimento de Água Bidestilada	9
5.4 Instalação da Fonte de Alimentação	10
5.5 Ozonização de Água	11
5.6 Utilização da Água Ozonizada pelo Sprayer	12
5.6.1 Instalação do Sprayer	12
5.6.2 Conexão do Sprayer à Torre	12
5.6.3 Remoção do Sprayer	13
5.6.4 Utilização do Sprayer	13
5.6.5 Carregamento da Bateria	14
5.7 Orientações Gerais	15
5.8 Características de funcionamento	15
6. INFORMAÇÕES GERAIS	16
6.1 Finalidade de uso	16
6.1.1 Indicação de uso	16
6.1.2 Contraindicações	16
6.2 Água Ozonizada - Propriedades	16
6.2.1 Toxicidade no ar	17
7. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS	18
8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - TROUBLE SHOOTING	19
9. MANUTENÇÃO	19
9.1 Limpeza e conservação	20
10. GARANTIA	20
11. ETIQUETAS DO PRODUTO	21
11.1 Etiqueta indelével	21
11.2 Etiqueta de informações técnicas	21
12. PROTEÇÃO AMBIENTAL	23



Notas explicativas com este símbolo requerem a atenção do usuário, ou por indicar uma ação obrigatória ou para alertar sobre um risco ou perigo.



Notas explicativas com este símbolo apenas esclarecem informações, não sendo necessária nenhuma ação ou cuidado.

Tabelas

Tabela 1 - Partes e acessórios fornecidos com o equipamento	7
Tabela 2 - Partes e acessórios não fornecidos com o equipameno	7
Tabela 3 - Características técnicas da Torre de Ozonização 3L Vet.....	8
Tabela 4 - Efeito do ozônio em seres humano - exposição via aérea.....	17
Tabela 5 - Falhas e defeitos	19
Tabela 6 - Símbolos encontrados no produto ou nas caixas	23

Figuras

Figura 1 - Comandos, conexões e partes relevantes dos equipamentos.....	6
Figura 2 - Encaixe da base da Torre.....	9
Figura 3 - Abastecimento da Torre com Água Bidestilada.....	10
Figura 4 - Etapas para instalação da fonte de alimentação	11
Figura 5 - Ozonização de Água	11
Figura 6 - Conexão do Sprayer à Torre	12
Figura 7 - Remoção do Sprayer	13
Figura 8 - Ligando Sprayer	13
Figura 9 - Ajuste do bico do Sprayer	14
Figura 10 - Carregamento do Sprayer	14
Figura 11 - Etiqueta indelével com número de série.....	21
Figura 12 - Etiqueta de informações técnicas	21



Fabricante e Distribuidor:

PHILOZON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GERADORES DE OZÔNIO LTDA

CNPJ: 07.138.875/0001-01

IE: 254.915.329

Endereço:

Rua Acadêmico Rafael Goulart, 133

Bairro Nova Esperança

Balneário Camboriú – SC

CEP: 88.336-285

FONE: 47 3366 7000

E-MAIL: assistencia@philozon.com.br

SITE: www.philozon.com.br

2

TORRE DE OZONIZAÇÃO 3L VET

A Torre de Ozonização de Água 3L Vet foi projetada para transformar os tratamentos veterinários, oferecendo um Sprayer exclusivo que garante uma utilização simples, prática e de alta performance, proporcionando resultados confiáveis.

Com funcionalidades específicas do Sprayer como a bateria recarregável e o bico com regulagem, a Torre oferece ampla aplicação, otimizando o tempo e aumentando a eficiência do profissional.

Com design moderno e compacto, iluminado por LED, a Torre combina sofisticação e funcionalidade, elevando o padrão e tornando-se indispensável para profissionais que buscam excelência.

3

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes de utilizar o equipamento verifique os itens que acompanham o produto, caso encontre alguma divergência ou sinta falta de algum item, contate a Philozon.

- **01 Torre de Ozonização 3L;**
- **01 Fonte de alimentação;**
- **02 Cabos USB para USB-C;**
- **01 Sprayer com mangueira;**
- **01 Mangueira para Ozonização;**
- **01 Base de fixação para bancada.**

4

APRESENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO



Figura 1 - Comandos, conexões e partes relevantes dos equipamentos Torre de Ozonização de Água 3L

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 - Tampa | 7 - Conexão USB-C alimentação da Torre |
| 2 - Tubo de vidro c/ graduações | 8 - Sprayer |
| 3 - Suporte Sprayer | 9 - Bico com Regulagem |
| 4 - Conexão Luer lock | 10 - Botão de acionamento |
| 5 - Conexão USB-A alimentação Sprayer | 11 - Conexão de Carregamento |
| 6 - Conexão de engate rápido | 12 - Conector de engate rápido |

4.1 Partes Incluídas (Lista de Acessórios)

Componente	Quantidade	Foto
Fonte de alimentação 5V 2A com cabo USB-C - 1m	01	
Sprayer	01	
Cabo USB	01	

Mangueira para Ozonização	01	
Base de fixação para bancada	01	

Tabela 1 - Partes e acessórios fornecidos com o equipamento



Os componentes e acessórios que integram a Torre de Ozonização de Água 3L são de uso exclusivo deste equipamento.

4.2 Partes necessárias para o funcionamento, mas não inclusas no fornecimento

Componente	Foto
Gerador de ozônio Philozon	
Água bidestilada ou de ozmose reversa	

Tabela 2 - Partes e acessórios não fornecidos com o equipamento

4.3 Especificações Técnicas

Características	Especificações
Nome	Torre de Ozonização de Água 3L Vet
Dimensões	670 x 172 x 159 mm
Peso	1,95 kg
Capacidade máxima	3000mL
Tubo de Vidro	Tubo de vidro com marcações de nível em 0,5, 1, 2 e 3L
Destrutor de O ₃	Destrutor catalítico integrado ao sistema que converte o ozônio em oxigênio
Sprayer	Pistola de liberação de água automática, contando com bico regulador, bateria recarregável e acionada por botão.
Vazão de água	500mL/min
Alimentação Elétrica	USB-C - 5V - 2A

Tabela 3 - Características técnicas da Torre de Ozonização 3L Vet

4.4 Embalagem

A Torre de Ozonização de Água 3L Vet é embalada com materiais de alta resistência e qualidade, garantindo a segurança e integridade do produto durante o transporte.

A caixa de papelão protege contra impactos e danos, enquanto o equipamento é envolto em EPS (poliestireno expandido), material que absorve choques e vibrações, assegurando que o produto chegue em perfeito estado.

Os acessórios que acompanham a torre são embalados em sacos plásticos e armazenados dentro de uma caixa de acessórios, que oferecem maior proteção durante o transporte.

5.1 Orientações Gerais

Para realizar a ozonização de água siga o passo a passo indicado nessa etapa. A Torre de Ozonização de Água 3L Vet é um equipamento destinado ao uso por profissionais habilitados.

5.2 Instalação e fixação da Torre

Posicione a Torre de Ozonização em um local plano, próximo ao gerador de ozônio Philozon. Se desejar, pode utilizar a Base de Fixação para Bancada para garantir maior segurança. A base de fixação possui fita dupla face para ser colada ou furação para ser parafusada no local desejado.

Para encaixar a torre na base de fixação, prenda a base no local desejado e alinhe os recortes de encaixe na base da torre com os pinos de fixação da base. Puxe a torre para frente até realizar o encaixe. Dessa forma, a torre ficará mais segura, minimizando o risco de quebra se ocorrer esbarros ou batidas acidentais.



Figura 2 - Encaixe da base da Torre

5.3 Abastecimento de Água Bidestilada

Apenas água bidestilada ou de osmose reversa são adequadas para utilização na Torre de Ozonização.

Para abastecer a torre, remova a tampa. Segure o vidro firmemente perto da tampa e gire-a no sentido anti-horário até que a tampa se solte do vidro.

Preencha o vidro com a quantidade de água bidestilada desejada, respeitando os níveis mínimo e máximo indicados no vidro.

Após adicionar a água, rosqueie a tampa no topo do vidro no sentido horário, segurando o vidro firmemente. Realize um aperto moderado para garantir que a tampa vede corretamente o vidro.



Figura 3 - Abastecimento da Torre com Água Bidestilada



As marcações de nível são aproximadas e servem apenas como orientação, podendo apresentar variações.



Certifique-se de que água ou outros líquidos não entrem na tampa, pois isso pode comprometer sua eficiência.



Antes de inserir a água na torre, verifique se o vidro está bem fixado ao gabinete e remova qualquer item conectado à conexão de engate rápido lateral para evitar vazamentos.


5.4 Instalação da Fonte de Alimentação

O processo de instalação da fonte de alimentação do seu equipamento consiste em duas etapas:

1. Conecte o cabo USB à fonte de alimentação e o conector USB-C na lateral da Torre de Ozonização.
2. Conecte a fonte de alimentação à tomada. Ao receber energia, o LED azul da Torre de Ozonização deverá acender.

A fonte de alimentação externa fornecida é parte integrante do equipamento e seu uso é essencial para o correto funcionamento da Torre de Ozonização.

Figura 4 - Etapas para instalação da fonte de alimentação

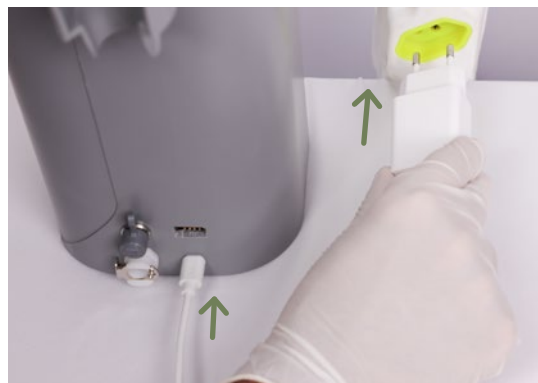

5.5 Ozonização de Água

Para realizar o processo de ozonização da água, após encher a torre, conecte a mangueira à conexão Luer Lock na lateral da torre, levantando a tampa de proteção. A outra ponta da mangueira deve ser conectada ao bocal de saída do gerador de ozônio.

Ajuste os parâmetros desejados e inicie o processo de ozonização. Após o término do uso, remova a mangueira da Torre de Ozonização.



Figura 5 - Ozonização de Água



Sempre remova a mangueira entre a Torre e Gerador. Manter a mangueira conectada pode permitir o retorno de água até o gerador de ozônio, o que pode causar danos ao equipamento.



Se durante ou após a ozonização da água for percebido um forte cheiro de ozônio no ambiente, isso pode indicar um vazamento pela tampa. Verifique se a conexão da tampa está devidamente ajustada para evitar o problema.



A conexão de entrada de ozônio deve estar sempre fechada com a tampa. Tome cuidado para que nenhum líquido entre no equipamento.

5.6 Utilização da Água Ozonizada pelo Sprayer

5.6.1 Instalação do Sprayer

O Sprayer é uma pistola de liberação automática de água, equipada com bateria recarregável. Ao pressionar o botão de acionamento, a água é conduzida do interior da torre até o bico com regulação.

5.6.2 Conexão do Sprayer à Torre

Para conectar o Sprayer à torre, siga os passos abaixo:

- 1. Verifique a posição da trava:** certifique-se de que a trava da conexão de engate rápido, localizada na lateral da torre, está na posição correta. Para isso, empurre a trava metálica na direção da conexão. Assim, o pino da trava será deslocado para fora.
- 2. Conecte a mangueira:** Insira o conector macho, presente na mangueira com memória do sprayer, até o final da conexão de engate rápido lateral. Ao pressionar o conector, o pino da trava será acionado, gerando um "clique", o que indica que a conexão está firmemente travada, evitando vazamentos.
- 3. Dificuldade na conexão:** se houver resistência ao conectar o engate rápido, aplique vaselina na região do anel de vedação do conector da mangueira para facilitar a conexão.



Figura 6 - Conexão do Sprayer à Torre

5.6.3 Remoção do Sprayer

Para desconectar o sprayer:

1. Pressione a parte metálica da trava até ouvir um "clique".
2. O pino da trava irá liberar automaticamente o conector de engate rápido.
3. Puxe o conector para removê-lo da torre.



Figura 7 - Remoção do Sprayer



Um leve vazamento de água pode ocorrer ao retirar o Sprayer da Torre

5.6.4 Utilização do Sprayer

Com o Sprayer conectado à torre, basta pressionar o botão para liberar o jato de água e direcioná-lo ao local desejado. Para interromper o fluxo, pressione o botão novamente. Quando ativado, o botão apresenta uma luz azul.



Figura 8 - Ligando Sprayer

O ajuste do jato é feito girando a ponta do bico do Sprayer. Ao mantê-lo apertado, a aspersão ocorre em formato de cone, cobrindo uma área maior. Ao desroscar o bico, o jato se torna mais concentrado, aumentando a pressão e a distância de aplicação.

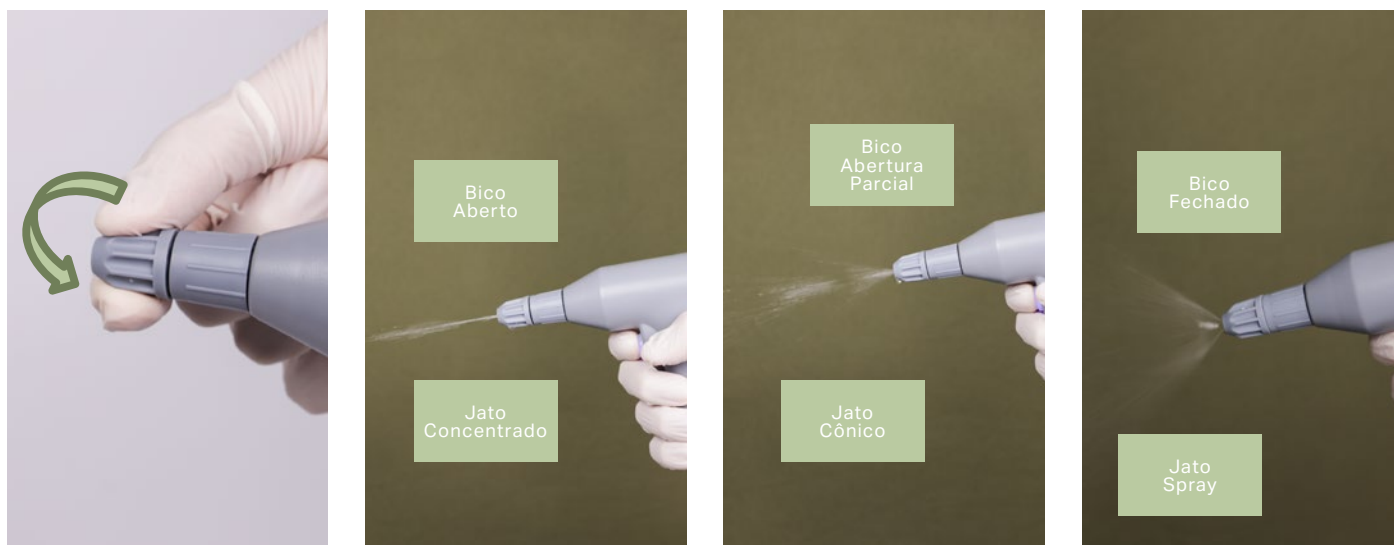


Figura 9 - Ajuste do bico do Sprayer



Evite manter o Sprayer conectado à torre de ozonização quando não estiver em uso.

5.6.5 Carregamento da Bateria

Se a bateria do Sprayer acabar, ele pode ser recarregado de duas formas: conectando o cabo USB entre ele e à torre de ozonização, desde que esteja ligada à energia, ou diretamente à fonte 5V que acompanha a torre. Durante o carregamento, uma luz vermelha acende no botão do Sprayer, mudando para azul quando a carga estiver completa.

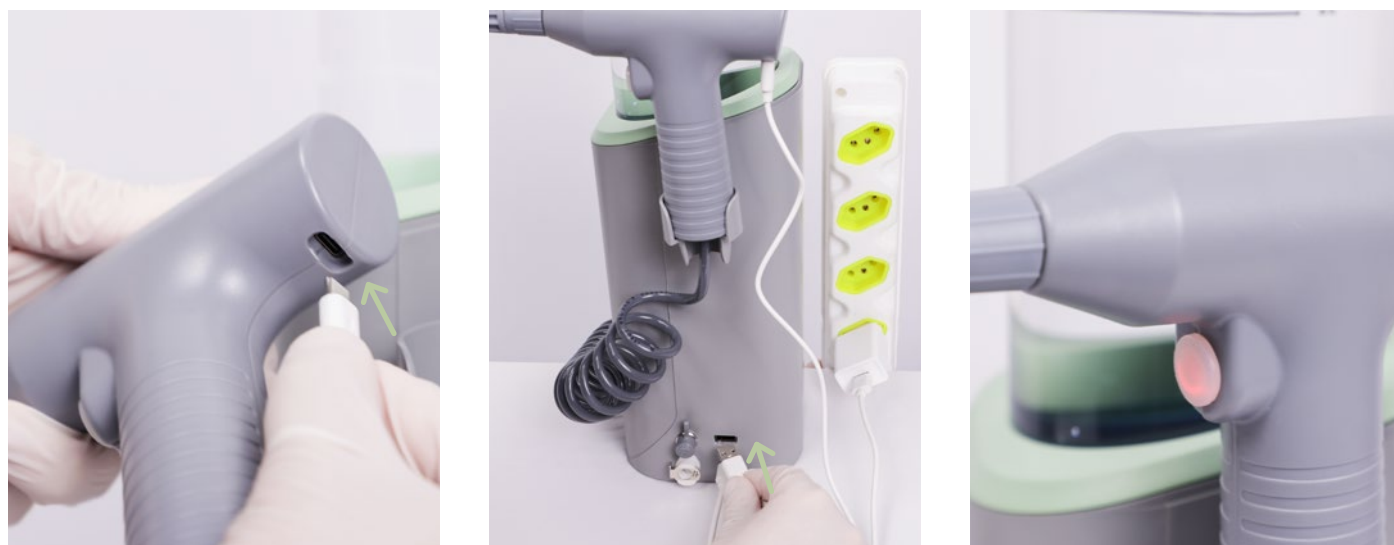


Figura 10 - Carregamento do Sprayer

5.7 Orientações Gerais

Para a melhor instalação de seu equipamento é sugerido atentar-se a alguns detalhes importantes:

- Não instale o equipamento onde há incidência de luz solar direta ou fontes de calor;
- Evite instalar em áreas com umidade, poeira, vibrações ou superfície inclinada;
- Evite a entrada de água na tampa catalisadora, quando umedecido o catalisador perde seu efeito e pode ocorrer liberação de ozônio no ambiente;
- Umidade relativa do ar recomendada entre 35 e 80%;
- Recomenda-se climatizar o ambiente entre 18° a 24° C;
- Manter o equipamento sempre na posição vertical;
- Não utilize o dispositivo em pequenas salas ou ambientes sem circulação de ar;
- Não ligue muitos aparelhos elétricos a uma única tomada. Poderá causar sobreaquecimento ou curto-circuito;
- Não obstrua a base da tampa catalisadora, por suas laterais ocorre a saída do oxigênio, residual do processo de ozonização. A obstrução pode causar interrupção do processo de ozonização e vazamentos de água.

5.8 Características de funcionamento

A Torre de Ozonização de Água 3L Vet apresenta algumas características durante seu funcionamento normal, conforme apresentado abaixo:

- Leve vibração e ruído: Ocorrem quando a água está sendo liberada.
- Leve ruído durante a ozonização de água: Gerado pela passagem do gás por válvulas internas.
- Redução da luminosidade e tremeluzimento do LED: Pode ocorrer dependendo da corrente consumida pelo sistema durante seu uso.

6.1 Finalidade de uso

6.1.1 Indicação de uso

A Torre de Ozonização de Água 3L Vet foi projetada e construída para fornecer, de forma consistente e segura, água ozonizada gerada por meio do borbulhamento de microbolhas de gás ozônio, atendendo aos padrões científicos e protocolos internacionais.

A Torre de Ozonização pode fornecer água ozonizada através do Sprayer, permitindo regulagem através de seu bico, proporcionando um jato único ou a aspersão de água ozonizada.

Não é necessário conectar a Torre à energia elétrica para utilização do Sprayer, apenas para carregamento do mesmo.

6.1.2 Contraindicações

Não há contraindicações em relação à aplicação de água ozonizada para a indicação aqui mencionada, mas o uso só pode ser prescrito por um profissional habilitado, que deve estabelecer a dosagem adequada para cada paciente.

6.2 Água Ozonizada - Propriedades

O funcionamento da Torre de Ozonização baseia-se na difusão eficiente do ozônio na água, realizada através do contato de microbolhas do gás com o líquido. Esse processo é viabilizado por uma mangueira conectada à saída do Gerador de Ozônio Philozon, que se acopla à entrada de gás localizada na lateral da Torre.

O gás ozônio é então direcionado para a parte inferior da Torre, onde é liberado por um difusor de cerâmica, formando as bolhas. Pela diferença de densidade, essas microbolhas ascendem pela água, permitindo uma maior incorporação do ozônio no líquido. O gás residual é acumulado na parte superior da Torre e conduzido pela tampa, onde passa por um catalisador integrado. Este catalisador converte o ozônio remanescente em oxigênio, garantindo que apenas oxigênio seja liberado de forma segura no ambiente.

Essa tecnologia proporciona um método eficaz e seguro para a preparação de água ozonizada, amplamente utilizada na prática clínica.

6.2.1 Toxicidade no ar

A inalação do gás ozônio pode ser prejudicial ao sistema pulmonar e possivelmente a outros órgãos. A exposição prolongada ao ozônio causa toxicidade progressiva, conforme exemplificado na tabela 4.

CONCENTRAÇÃO	EFEITOS
0,1 ppmv (0,2 mg/m ³)	Lacrimejamento e irritação no trato respiratório superior.
0,1 ppmv (0,2 mg/m ³)	Rinite, tosse, cefaleia, náuseas. Pessoas predispostas podem desenvolver asma.
2 a 5 ppmv (4 a 10 mg/m ³) 10 a 20 min	Aumento progressivo de dispneia.
5 ppmv (10 mg/m ³) 60 min	Edema agudo de pulmão e ocasionalmente paralisia respiratória.
10 ppmv (20 mg/m ³)	Morte dentro de 4 horas.
50 ppmv (100 mg/m ³)	Morte em minutos.

Tabela 4 - Efeito do ozônio em seres humano - exposição via aérea



A exposição via aérea NÃO É UM PROTOCOLO DE TRATAMENTO. As informações aqui fornecidas são para eventuais incidentes que provoquem o vazamento de ozônio no ambiente. O ozônio nunca deve ser cheirado ou inalado, sendo importante manter o ambiente de aplicação ventilado, mesmo durante o uso de rotina.

- Cuidado para que não entre água no equipamento. Na ozonização de água, mantenha sempre a Torre de Ozonização no mesmo nível que o equipamento, para evitar retorno de água. Nunca coloque a Torre em um nível mais alto que o gerador, pois a entrada de água pode danificar e causar a queima do equipamento.
- Não permita que o ozônio seja liberado diretamente no ambiente.
- Nunca abra o equipamento, pois isso poderá danificá-lo. Somente um profissional autorizado pela Philozon poderá fazê-lo com segurança.
- O equipamento não apresenta risco de choques elétricos quando operado conforme as instruções de uso. Caso ele seja aberto e colocado em operação, fato extremamente contraindicado pela Philozon, poderão ocorrer choques elétricos.
- Utilize o equipamento somente com a fonte de alimentação fornecida, pois o uso de uma fonte incompatível pode ocasionar choque elétrico, mau funcionamento e danos ao equipamento.
- Recomenda-se que seja utilizada somente água bidestilada ou de osmose reversa para o procedimento de ozonização de água.
- Caso ocorra alguma liberação de ozônio para o ambiente, deve-se proceder a seguinte forma:
 - 1 - Evitar a Inalação do gás ozônio;
 - 2 - Desligar o equipamento;
 - 3 - Remover as pessoas para um ambiente com ar fresco;
 - 4 - Ventilar a sala e sair do ambiente.



O equipamento e/ou suas partes não devem ser reparados ou submetidos a manutenção enquanto estiverem em uso.



Este equipamento está equipado com dispositivos de isolamento para desconexão segura da rede elétrica durante manutenções ou situações de emergência. Para interromper o fornecimento de energia, desconecte o conector/acoplador da fonte do equipamento. Para um isolamento completo, remova o plugue da tomada.



Este equipamento está equipado com dispositivos de isolamento para desconexão segura da rede elétrica durante manutenções ou situações de emergência. Para interromper o fornecimento de energia, desconecte o conector/acoplador da fonte do equipamento. Para um isolamento completo, remova o plugue da tomada.

8

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - TROUBLE SHOOTING

Se a Torre de Ozonização 3L Vet não funcionar corretamente, use o checklist abaixo para identificar e eliminar possíveis problemas. Se não for possível resolvê-los, entre em contato com a assistência técnica Philozon.

FALHA/DEFEITO	O QUE FAZER
1. Água não é liberada ao apertar o botão de acionamento	• Verifique se não tem obstruções • Verifique se o botão foi corretamente ativado. • Verifique se o LED Azul está ativo, caso sim, entre em contato com a assistência. • Caso o LED Azul no botão não esteja ativo, pode ser necessário recarregar a bateria do Sprayer antes da utilização.
2. Dificuldade de encaixar os conectores engate rápido	• Verifique se a posição da trava está correta, com a trava para dentro e o pino para fora. • Ao conectar, incline o conector na direção do pino para facilitar o acionamento dele.
3. Dificuldade de montar a tampa ou o vidro no local correto	• Verifique se o anel de silicone está corretamente posicionado na cavidade. • Verifique se a rosca está bem encaixada e alinhada.
4. Cheiro de ozônio no ambiente	• Remova a tampa da torre e rosqueie novamente verificando se está alinhada empregando aperto firme • Insira uma luva de latex cobrindo toda a tampa da torre até o vidro faça um pequeno furo em um dos dedos • Inicie a geração de ozônio e verifique se a luva se deteriora, se isso ocorrer a tampa está com vazamento, caso contrário a tampa não apresenta vazamento

Tabela 5 - Falhas e defeitos

9

MANUTENÇÃO

Em hipótese alguma o gabinete do equipamento deve ser aberto; este procedimento deve ser realizado apenas por um profissional habilitado da Philozon, pois há risco de choque elétrico e de danos ao equipamento.

9.1 Limpeza e conservação

- Esvazie o tubo de vidro utilizando o Sprayer da torre.
- Desconecte a fonte de alimentação e mangueiras da torre.
- Remova a tampa e desrosque o tubo de vidro do gabinete.
- Lave o tubo de vidro com água e detergente neutro e deixe-o secar naturalmente.
- Limpe o gabinete e acessórios com um pano umedecido em detergente neutro.
- Promova a recirculação de água de osmose reversa ou bidestilada pelo Sprayer, coloque a ponta da mangueira dentro de um recipiente, acione o Sprayer e deixe que ele reabasteça o recipiente com a mangueira por alguns minutos.



A tampa possui sistema interno de catalisação/destruição do ozônio e conversão em oxigênio. Por segurança, recomenda-se a substituição da tampa a cada ano.



Não utilize produtos químicos ou abrasivos na limpeza. Recomenda-se realizar uma limpeza inicial antes do primeiro uso.

10

GARANTIA

O equipamento possui 90 dias de garantia, contados a partir da emissão da nota fiscal, desde que o equipamento não seja aberto por pessoal não autorizado. O equipamento será reparado na própria sede da Philozon, não cabendo a esta quaisquer ônus ou responsabilidades decorrentes de eventuais procedimentos realizados por pessoas ou estabelecimentos não autorizados.

Não são cobertos pela garantia:

- Danos originados pela não observação do manual de instruções, instalação incorreta ou uso inadequado.
- Danos originados por modificação ou reparação realizada por terceiros não autorizados ou pelo(a) próprio(a) comprador(a), identificados pela violação dos selos de segurança do equipamento.
- Danos causados por uso de acessórios ou peças que não fazem parte do equipamento ou que não sejam fornecidos pelo fabricante ou não indicados.
- Danos causados por alimentação incorreta de tensão, oscilações e/ou sobrecorrentes na rede elétrica de alimentação.
- Danos causados por terceiros ou por fatores fora do alcance, controle ou ingerência das partes.
- A utilização de água diferente das especificadas (bidestilada ou de osmose reversa).
- Danos causados por impacto, choques físicos ou quedas do equipamento.
- Substituição de peças decorrente de seu desgaste natural.

11

ETIQUETAS DO PRODUTO

11.1 Etiqueta indelével



Figura 11 - Etiqueta indelével com número de série

11.2 Etiqueta de informações técnicas

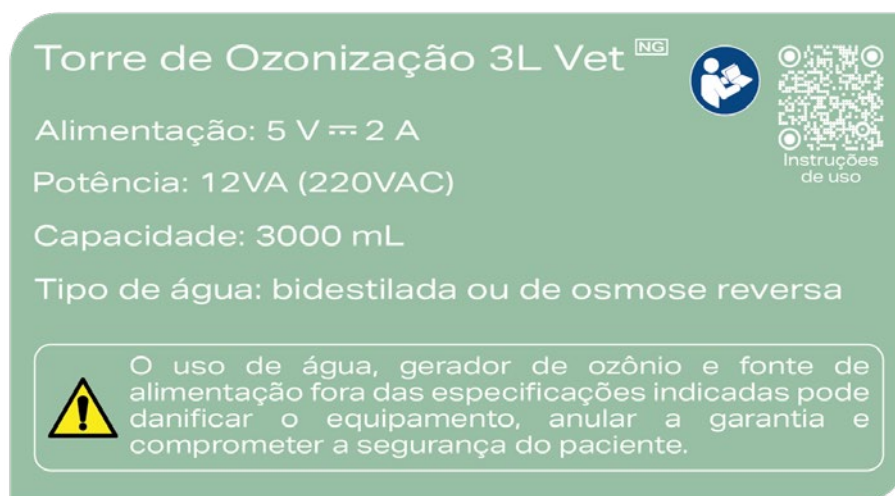


Figura 12 - Etiqueta de informações técnicas

	Atenção	Avisos importantes que requerem atenção sobre o equipamento.
	Informações no Manual	Consulte o Manual de Uso para mais informações além das descritas na etiqueta.
	Este lado para cima	Indica a posição correta para cima da embalagem de transporte.
	Frágil	Indica que o equipamento pode ser quebrado ou danificado se não for manuseado com cuidado.
	Manter seco	Indica que o equipamento precisa ser protegido da umidade.
	Reciclar	Indica que o material deve ser reciclado de acordo com as diretrizes e normas locais de reciclagem.
	Condição de descarte no fluxo de resíduos	Indica que produtos eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum.
	Limite de umidade	Indica o nível de umidade ao qual o equipamento pode ser exposto com segurança (20% a 90%).
	Limite de temperatura	Indica os limites de temperatura aos quais o equipamento pode ser exposto com segurança (15°C a 30°C).


	Limite de pressão	Indica o nível de pressão atmosférica ao qual o equipamento pode ser exposto com segurança (700 hPa a 1060 hPa).
	Manter afastado da luz solar	Indica que o equipamento deverá ser protegido de ataques diretos luz solar.
	Limite de empilhamento por número	Indica que o produto não deve ser empilhado verticalmente além da quantidade especificada.
	Somente para uso interno	Indica que o equipamento e seus acessórios devem ser usados somente em ambientes internos.

Tabela 6 - Símbolos encontrados no produto ou nas caixas

12

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Orientamos que o equipamento Torre de Ozonização de Água 3L Vet e seus acessórios não sejam descartados no lixo comum (urbano), pois há riscos de contaminação ao meio ambiente associados ao descarte de componentes eletrônicos, plásticos, metais, etc., ao final de suas vidas úteis. Sendo assim, solicitamos que entre em contato com as autoridades locais, empresas de reciclagem, ou fale com a Philozon pelos canais disponíveis em nosso site www.philozon.com.br para receber orientações sobre como proceder com o descarte final.

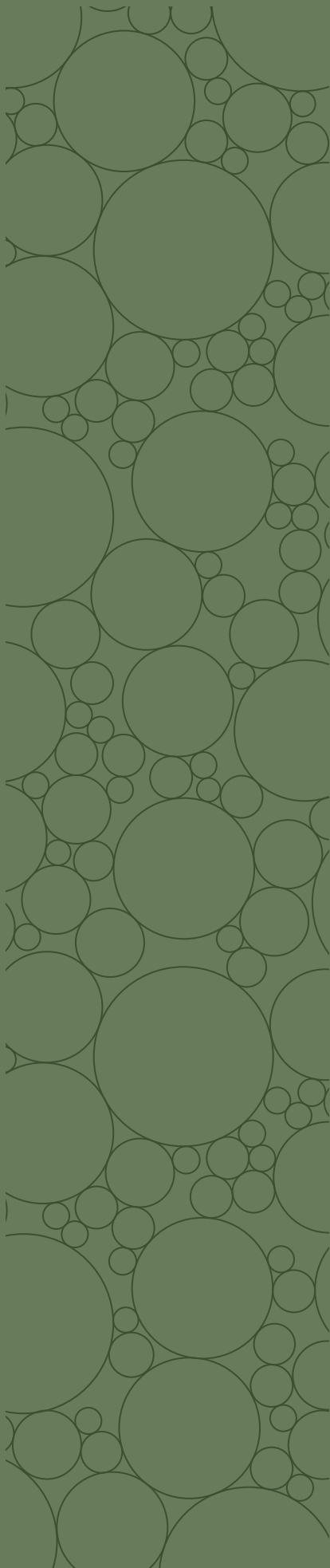

Rua Acadêmico Rafael Goulart, 133
Nova Esperança
Balneário Camboriú/SC
CEP 88336-285

assistencia@philozon.com.br
(47) 3366-7000
philozon.com.br